

Prueba del Anticuerpo contra *Leishmania*

Nº de Cat.: W81118

1. USO PREVISTO

La Prueba Rápida del Anticuerpo contra *Leishmania* es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral tipo sándwich para la detección cualitativa del anticuerpo contra *Leishmania* (LSH Ab) en suero de perros.

Tiempo de Ensayo: 5-10 min.

Muestra: Suero.


2. PRINCIPIO DEL ENSAYO

La Prueba Rápida del Anticuerpo contra *Leishmania* se basa en un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral tipo sándwich. El dispositivo tiene una ventanilla de análisis con una zona T (test) y una zona C (control) invisibles. Cuando se aplica la muestra en su pocillo del dispositivo, el líquido fluirá lateralmente sobre la superficie de la tira. Si hay suficiente anticuerpos contra *Leishmania* en la muestra, aparecerá una banda T visible. La banda C siempre debe aparecer tras aplicar una muestra, indicando un resultado válido. Mediante esto, el dispositivo puede mostrar con precisión la presencia de anticuerpos contra *Leishmania* en la muestra.

3. COMPONENTES DEL KIT

- 10 x bolsas de aluminio, cada una conteniendo un casete, una pipeta y un desecante.
- 10 x tubos de tampón de ensayo (0.5 ml cada uno).
- 10 x tubos de centrifuga.
- Manual del Producto.

4. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

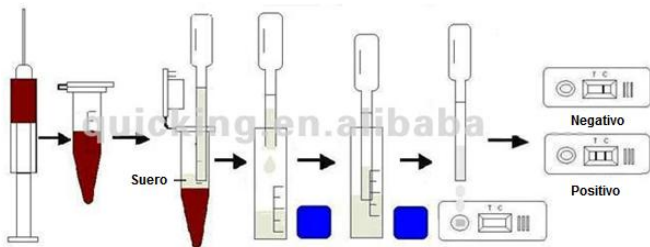

- Recoja el suero o plasma del perro como muestra.
- Eche 2 gotas de la muestra en el tampón de ensayo incluido y mezcle bien.
- Saque el casete de la bolsa de aluminio y póngalo horizontalmente.
- Eche despacio 3 gotas de la muestra extraída en su pocillo.


- Interprete el resultado en 5-10 minutos. Tras 10 minutos el resultado se considera como nulo.

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: Presencia tanto de la banda C como la banda T, sin importar que la banda T sea nítida o pálida.

Negativo: Solo aparece claramente la banda C.

Nulo: No aparece ninguna banda coloreada en la zona C, sin importar que aparezca la banda T.

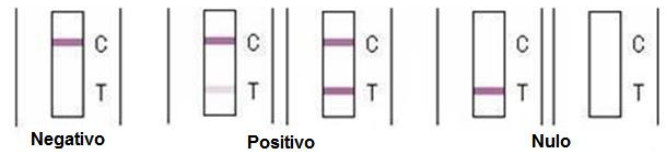

6. CONSERVACIÓN

El kit puede conservarse a temperatura ambiente (2-30 °C) y es estable hasta la fecha de caducidad (18 meses) impresa en la bolsa. **NO LO CONGELE.** No lo exponga a luz solar directa.

7. PRECAUCIONES

- Para mejores resultados, siga estrictamente las instrucciones.
- Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente antes de hacer el ensayo.
- No saque el casete de su bolsa hasta inmediatamente antes de usar.
- No reutilice el kit.
- No use la prueba pasada su fecha de caducidad impresa en la bolsa.
- Los componentes de este kit han pasado el control de calidad como unidad de lote estándar. No mezcle componentes de distintos números de lote.

8. LIMITACIÓN

La Prueba Rápida del Anticuerpo contra *Leishmania* es sólo para uso diagnóstico veterinario in vitro. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica veterinaria disponible. Para un resultado preciso, se sugiere aplicar otro método como ELISA para una determinación final en la práctica.