

Prueba del Anticuerpo contra *Ehrlichia canis*

Nº de Cat.: W81132

1. USO PREVISTO

La Prueba Rápida del Anticuerpo contra *Ehrlichia canis* es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral tipo sándwich para la detección cualitativa del anticuerpo contra *Ehrlichia canis* (Ehrl Ab) en suero o plasma de perros.

Tiempo de Ensayo: 15-20 min.

Muestra: Suero, plasma y sangre.


2. PRINCIPIO DEL ENSAYO

La Prueba Rápida del Anticuerpo contra *Ehrlichia canis* se basa en un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral tipo sándwich. El dispositivo tiene una ventanilla de análisis con una zona T (test) y una zona C (control) invisibles. Cuando se aplica la muestra en su pocillo del dispositivo, el líquido fluirá lateralmente sobre la superficie de la tira. Si hay suficientes anticuerpos contra *Ehrlichia canis* en la muestra, aparecerá una banda T visible. La banda C siempre debe aparecer tras aplicar una muestra, indicando un resultado válido. Mediante esto, el dispositivo puede mostrar con precisión la presencia de anticuerpos contra *Ehrlichia canis* en la muestra.

3. COMPONENTES DEL KIT

- 10 x bolsas de aluminio, cada una conteniendo un casete, pipeta y desecante.
- 10 x tubos de centrifuga.
- Manual del Producto.

4. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

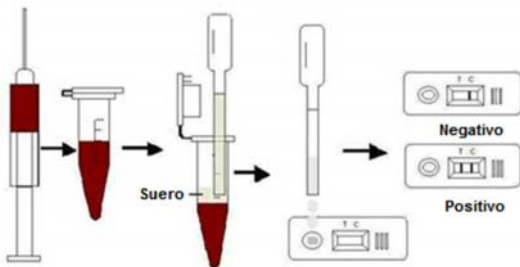

- Recoja el suero, plasma o sangre del perro como muestra (fresca o mantenida de 2 a 8°C no más de 3 días de recolectada).
- Saque el casete de la bolsa de aluminio y póngalo horizontalmente.
- Eche despacio 1 gotas de la muestra en su pocillo.
- Proceda a añadir 2 gotas de solución buffer


- Interprete el resultado en 15 minutos. Tras 20 minutos el resultado se considera como nulo.

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: Presencia tanto de la banda C como la banda T, sin importar que la banda T sea nítida o pálida.

Negativo: Solo aparece claramente la banda C.

Nulo: No aparece ninguna banda coloreada en la zona C, sin importar que aparezca la banda T.

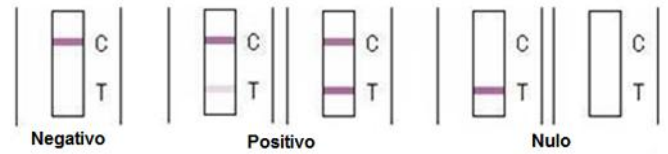

6. CONSERVACIÓN

El kit puede conservarse a temperatura ambiente (2-30 °C) y es estable hasta la fecha de caducidad (18 meses) impresa en la bolsa. **NO LO CONGELE.** No lo exponga a luz solar directa.

7. PRECAUCIONES

- Para mejores resultados, siga estrictamente las instrucciones.
- Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente antes de hacer el ensayo.
- No saque el casete de su bolsa hasta inmediatamente antes de usar.
- No reutilice el kit.
- No use la prueba pasada su fecha de caducidad impresa en la bolsa.
- Los componentes de este kit han pasado el control de calidad como unidad de lote estándar. No mezcle componentes de distintos números de lote.

8. LIMITACIÓN

La Prueba Rápida del Anticuerpo contra *Ehrlichia canis* es sólo para uso diagnóstico veterinario in vitro. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica veterinaria disponible. Para un resultado preciso, se sugiere aplicar otro método como IFA para una determinación final en la práctica.

LABORATORIOS HEIGA, S.L.

Polígono Industrial Oeste
C/ del Rocío, naves C-2 y C-3
30820 Alcantarilla - Murcia

T: 968 89 54 60
F: 968 89 54 70
murcia@laboratoriosheiga.com